


Delta 6000 ist ein AdO-System: ein Hörsystem bei dem der Hörer direkt im Gehörgang platziert wird und der Verstärker "auf dem Ohr" sitzt. Delta 6000 bietet eine automatische adaptive Direktionalität und eine modulationsbasierende Lärm-Unterdrückung. Dank der Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen Ohrstücken und 2 Verstärkungs-Strategien, eignet sich Delta 6000 für neue und erfahrene Träger mit einem Hörverlust bis zu 80 dB breitbandig.*

**) Auf dem Ohr-System*

Das Hörsystem besteht aus vier wesentlichen Bestandteilen:


- Die Verstärker-Einheit: Sie umfasst zwei moderne Mikrofone und einen neuartigen Verstärker.
- Die Hörer-Einheit: Der Hörer ist über ein dünnes Hörekabel mit dem Verstärker verbunden.
- Das Ohrstück: Mit Hilfe des Fixierschirms oder der Delta-Otoplastik wird der Hörer im Gehörgang sicher platziert.
- Die Halterung (Optional): Ein fester und komfortabler Sitz wird durch die Halterung, die sich an die individuelle Kontur des Ohres anpasst, sichergestellt.

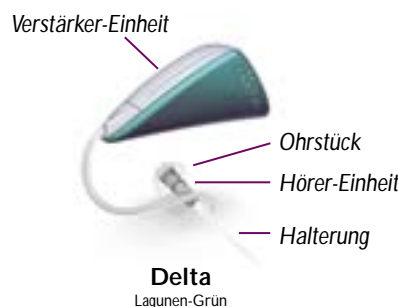

Standard Ausstattung

- Automatische adaptive Direktionalität
- Modulationsbasierende Lärm-Unterdrückung
- Manueller Anpass-Manager
- Profil-Auswahl, 3 Profile
- Frequenzbereich bis 6000 Hz
- 5 bis 7 Kanäle, abhängig von Ohrstück und Verstärkungs-Strategie

ANPASS-BEREICHE

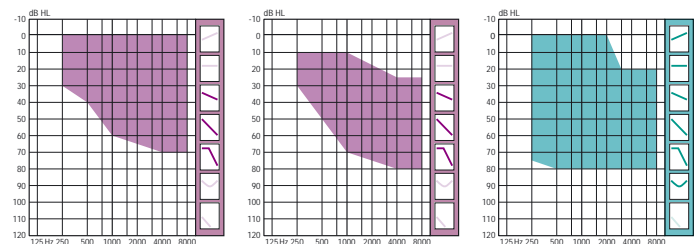

Offener Fixierschirm

Bass-Fixierschirm

Delta-Otoplastik




Audiologisches Konzept

- Clarity: Die Verstärkungs-Strategie in Delta, für leichte und Hochton-Schwerhörigkeiten, wurde entwickelt, um das Sprachverstehen in lärmvoller Umgebung deutlich zu verbessern.
- Sprach-stabilisierende Multi-Kompression (Voice Aligned Compression / VAC): Die Verstärkungs-Strategie in Delta für breitbandige Hörverluste, bietet eine curvilineare Kompression mit bis zu sieben Knipunkten und wurde entwickelt, um Klarheit und Lautheit in allen Hörsituationen zu ermöglichen.



Produktdetails



- Der Verstärker ist erhältlich in 3 Unterschalenfarben und 17 verschiedenen Gehäusefarben, die einfach durch den Hörakustiker oder Oticon ausgetauscht werden können.
- Die Hörer-Einheit ist in einer Farbe (hellgrau) erhältlich und über eine rote und blaue Farbmarkierung für die rechte oder linke Seite gekennzeichnet.
- 4 verschiedene Längen:
 - Kurz (Nr. 1)
 - Mittel (Nr. 2)
 - Lang (Nr. 3)
 - Extra Lang (Nr. 4)

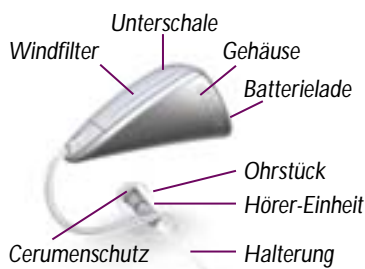

- Ohrstück-Optionen:
 - Offener Fixierschirm: Erhältlich in den drei Größen: 6 mm, 8 mm, 10 mm.
 - Bass-Fixierschirm (eine Größe)
 - Delta-Otoplastik: Ohrabdruck erforderlich
- Die Halterung kann vom Nutzer oder Hörakustiker entfernt werden. Die Halterung passt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite.
- Der Windfilter und die Batterielade können vom Hörakustiker gewechselt werden.
- Der doppelte Cerumenschutz kann ausgetauscht werden, wenn erforderlich.
- Batteriegröße 10
- Programmierbar mit der Oticon-Software Genie. Nutzen Sie das Standard-Kabel #3 und FlexConnect.

Technische Daten

Alle Messungen wurden an einem geschlossenen System durchgeführt (A0 Einstellung in Genie).

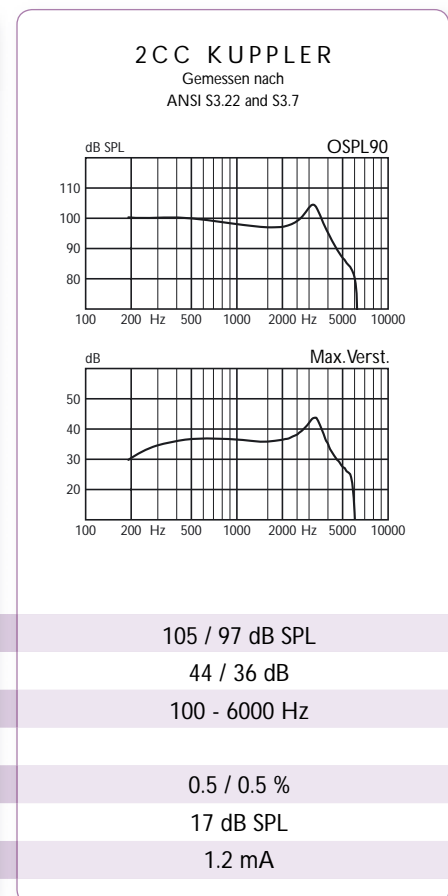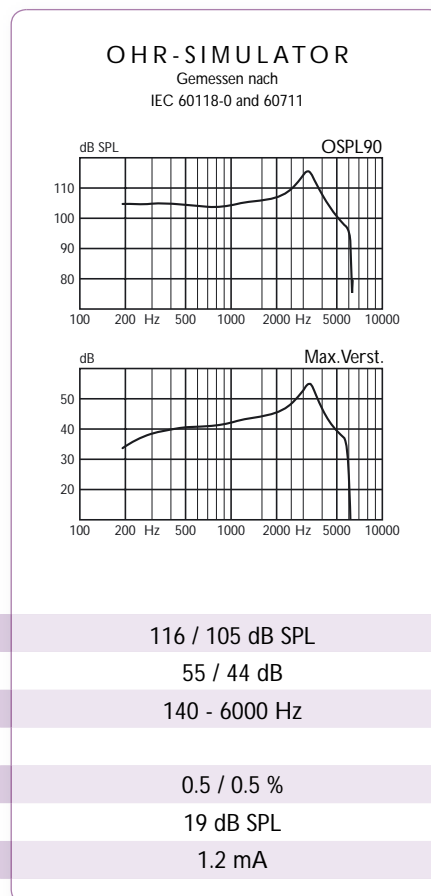

Batterielebensdauer, Typisch

70 Stunden

EMC Immunität - GSM / DECT (OMNI)

-36 / -35 IRIL, dB SPL