

*Der **Oticon ConnectLine Phone Adapter** ist eine Bluetooth-Schnittstelle zwischen einem analogen Festnetztelefon und dem Oticon Streamer. Er erweitert kompatible Hörsysteme in ein drahtloses Headset. Der Hörsystemeträger kann per Streamer über Festnetz telefonieren und erhält so eine bessere Verständlichkeit und Klangqualität.*

Als Teil der ConnectLine-Produktserie kann der Phone Adapter mit anderen ConnectLine Anwendungen wie z.B. TV, Handy oder dem ConnectLine Mikrofon zusammen genutzt werden.

Komplettes System

Innerhalb der ConnectLine-Serie erkennt der Streamer automatisch die verbundenen Geräte. Die Funktion „AutoPriority“ sorgt dafür, dass ein Telefonanruf immer Vorrang hat. Der Nutzer hört das Telefonklingeln während er z.B. mit dem TV Adapter fernsieht.

Einfaches Telefonieren über Festnetz

Der ConnectLine Phone Adapter ermöglicht in Verbindung mit dem Streamer und kompatiblen Hörsystemen das leichtere Telefonieren mittels eines herkömmlichen, analogen Festnetz-Telefons.

Einfache Handhabung

Der Phone Adapter wird einfach zwischen Telefonkabel (TAE-Kabel) und Telefon (oder bei schnurlosem Telefon die

Basis-Station) geschaltet. Die Kopplung zwischen Phone Adapter und Streamer wird einmalig durchgeführt. Innerhalb einer Reichweite von 30 m finden sich die Geräte automatisch und sind jederzeit einsatzbereit („AutoConnect“). Ein eingehendes Telefonat wird mit einem kurzen Druck auf die Telefontaste des Streamers angenommen.

Um selbst Telefonate zu führen, wird das Telefon wie üblich bedient und das Telefonat über den Streamer zu den Hörsystemen übertragen. Sobald ein Telefonat beendet wird, nimmt der Streamer automatisch seine ursprüngliche Funktion wieder auf, z.B. die Übertragung des Tons vom Fernseher.

Elegantes Design

Der schwarze Phone Adapter 2.0 ist kompakt, unauffällig und einfach zu bedienen.

Mehr Details erhalten Sie unter:
www.oticon.de.



Ausstattung

- Telefonkabel (RJ11 - RJ11 Anschluss)
- Netzstecker
- Bedienungsanleitung



Technische Informationen	
Kompatibilität	Streamer 1.4 (und höher)
Abmessungen	124 x 80 x 21 mm; Gewicht 100 g
ConnectLine System-Funktionen	AutoConnect: automatische Verbindung zum Streamer innerhalb der Reichweite AutoPriority: eingehende Anrufe haben Vorrang Der Phone Adapter wird automatisch mit dem Streamer gekoppelt, wenn sich der Streamer im Kopplungsmodus befindet (Abstand der Geräte zueinander bis 30 cm).
Reichweite	Bis 30 Meter mit Streamer Pro (freie Sichtlinie)
Schnittstellen	Telefon-Anschluss für (analoges) Festnetz-Telefon (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine Ein/Aus (3,5 mm Klinckenstecker) für den direkten Anschluss z.B. eines Computers ¹
Stromaufnahme	Max. 190 mA (bei Nutzung des beiliegenden Netzsteckers)
Headset Eingangsempfindlichkeit	Max. 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Headset Ausgangsempfindlichkeit	-15 – -10dBmV(RMS), 10 - 100 Ω
Frequenz	Lizenzfrei 2,4 GHz (ISM Band)
AutoConnect	Ja (30 Meter)
Audioqualität	Mono / 8 kHz Abtastfrequenz
Audio-Bandbreite	80 Hz - 3,5 kHz
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 70 °C
Störaussendung	Max. 39 dBµV/m @ 3 Meter (Erfüllt alle relevanten Normen)

Hinweise:

1. Ein Verbindungskabel zum Computer wird mit dem Streamer Pro geliefert und ist auch als Zubehör erhältlich.